



PRIMEDIC™
Saves Life. Everywhere.



PRIMEDIC™ 普美康™

自动体外除颤器AED介绍





仪器正面



1.把手

2.用于打开机盖的搭口，带**SavePads**电极

3.机盖

4.状态显示屏



仪器背面



墙面支架钩子接口

铭牌

HeartSave AED仪器介绍：仪器面板



PRIMEDIC™
Saves Life. Everywhere.



HeartSave AED仪器介绍：主机面板



1 电源开关

2 带LED指示灯的电极图示

3 带病人图示的面板

4 心电图分析时本图示亮起
----不准接触病人

5 喇叭

6 电极插头的插口

7 除颤启动键

8 语言选择键

HeartSave AED仪器介绍：急救工具包



- 1 机盖
- 2 用具板，带说明书，人工呼吸膜和备皮刀
- 3 除颤电极
- 4 橡胶手套 (非无菌)



1. 一次性除颤电极插头
2. 一次性除颤电极片，带保护膜



插上电极

HeartSave AED仪器介绍：语言栏及状态栏



1 语言选择键


2 状态显示屏



- 语言和数据存储
 - Compact Flash-存储卡
(2G CF-卡标配)
- 数据范围
 - 自检
 - 开机，心电图，事件（除颤）
 - 语音
- 记录时间 > 100小时



HeartSave AED仪器介绍： 电池

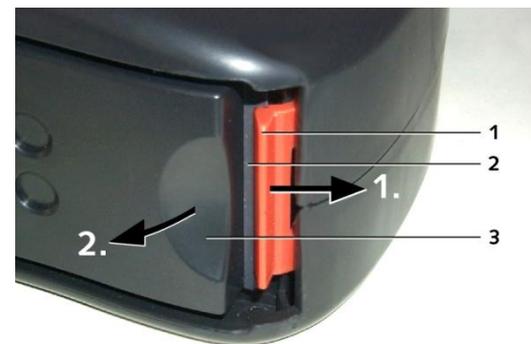

电池的取放



- 如果电池标记亮起，仪器电池应立即更换
- 电池标记亮起后，电池内的剩余电量仍可供仪器除颤5次。





- 每天将自动进行检验，并把检测结果显示在状态显示屏
- 此处如果显示 „OK“，表明仪器可随时使用！





- 仪器中语音提示常设有三种语言可选：

中文，英文，俄文





- 仪器每天，每周，每月进行自动自检
- 使用者只需检查状态显示屏上是否显示**OK** 即可知道仪器是否正常!





- 如果出现螺丝刀标记，说明仪器出现故障—仪器不能使用—请与客户服务人员联系。





1. 拨打紧急求助电话
2. 放置电极
3. 插上电极

自动播放语音操作指导



- 开机后，如**10**分钟内未接受心电图信号或未按下任何按键，仪器将自动关闭。关机前**30**秒钟仪器将发出间断的警告音给予提醒。在仪器上进行任意操作可中止关机过程。



- 病人身上如果带有传导性液体 (水或其他), 仪器不得使用。
- 仪器如果有损坏, 出于安全考虑, 不得继续使用。



- 电容内部充电后，除颤脉冲所需的能量可在**15**秒钟内使用，通过一声持续信号音和启动键亮起绿色提示已准备好。同时，在带监护的机型显示屏上显示剩余时间。
- 如果在此**15**秒钟期间内未进行除颤，仪器将进行内部安全放电。



感谢您的关注