



PRIMEDIC™
Saves Life. Everywhere.



PRIMEDIC™ 普美康™

自动体外除颤器AED操作方法





1、开机

三种开机方式：

- (1) 打开机盖，自动开机。
- (2) 按面板上的电源开关键开机。
- (3) 重新安装电池后，自动开机。



HeartSave AED仪器操作1： 1.2取下急救包



- 取下急救包

- 手套
- 呼吸膜
- 备皮刀
- 电极

- 电极粘性(保质期)


- 见附件带封口







检查病人：

- 脱去病人上身衣物
- 必要时用备皮刀去除毛发
- 必要时将皮肤擦干

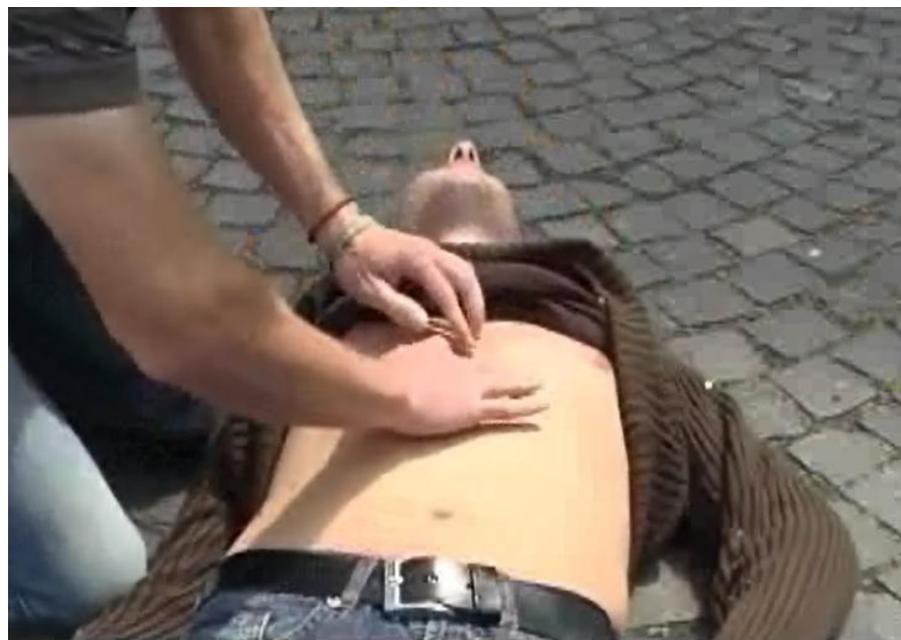

✿ 在病人身上安放电极以前，请完成语音提示所要求的心肺复苏步骤！


HeartSave AED仪器操作3: 3.1放置电极片

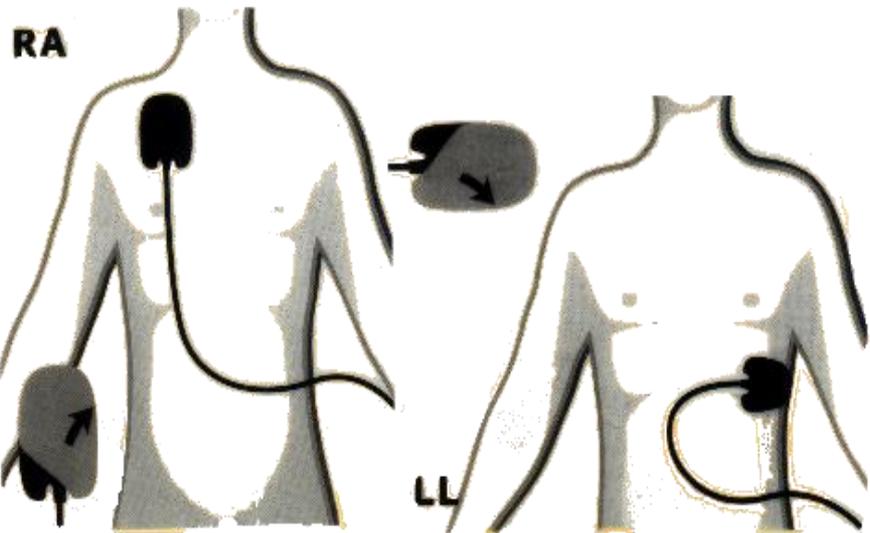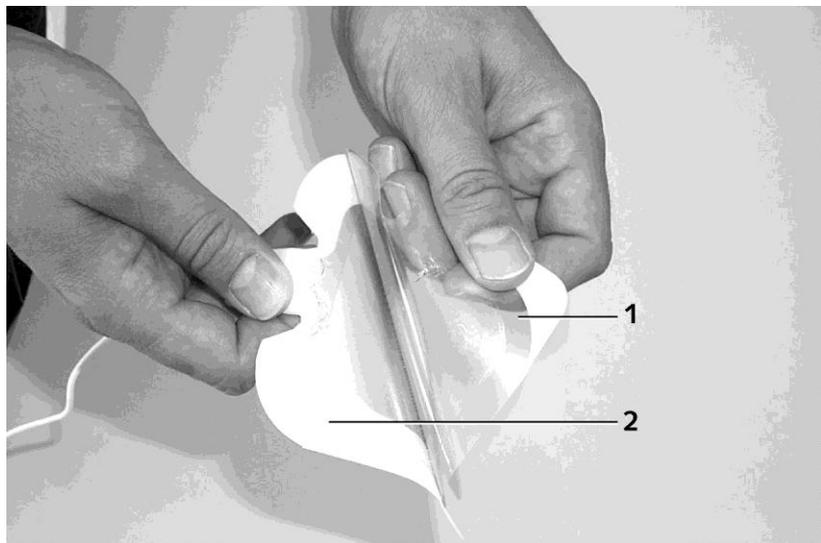

撕下普美康™ savepads保护膜。

1 保护膜 2 电极

- 拉下电极贴片上的保护薄膜，贴上电极，使电极片下没有气泡残余！
- 电极贴好后，电极红色指示灯熄灭，如果电极粘贴接触不佳，红色提示灯会再次亮起，并语音提示：**检查电极**

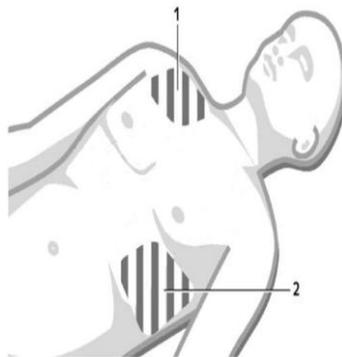

将电极片贴在病人身上

位置：(1)(RA)右胸区域:锁骨中线的下方

(2)(LL)左胸区域:心尖上方的腋线上。



插上电极插头

插上电极后，语音提示被自动中止。



检查电极

- 如果仪器报警，可能是由不同原因造成的：
- 除颤电极之间有接触，或有导电的凝胶相连。
- 病人毛发未除去。
- 皮肤和除颤电极之间有空气，造成接触不良。
- 电极凝胶涂层干燥。



不要接触病人，心电图分析

- 仪器自动进行心电图分析和决定是否进行除颤：7—12秒钟





建议除颤：

不要接触病人， 按下除颤键  。

在能量释放之前及其过程中， 必须让所有复苏措施的参与者后撤， 并且将所有与病人的接触或可导物体（如担架）隔绝!!

不建议除颤：

根据仪器提示操作.... 心肺复苏
(30次心脏按压， 2次送气)





6. 如果需要除颤，仪器语音提示：

- < 建议除颤 >
- < 正在充电 >
- < 不要接触病人 >
- < 正在充电 >
- < 不要接触病人 >



一旦内部充电完成，能量可保持15秒，绿色除颤启动键闪亮进行提示，语音指导：

- < 退离患者，开始除颤 >
请按下除颤键进行除颤



不需要除颤时，语音提示：

- < 不建议除颤 >
- < 心肺复苏 >
- < 做**30**次心脏按压 >
- < 进行两次送气 >

在做心脏按压时，仪器内置的节拍器可提供正确的心脏按压节律指导（**100**次/分钟）。请确保您跟上给出的节律。人工呼吸也同样有两声输出音做指导。



- 如果建议除颤， 仪器根据病人阻抗进行除颤；
- 除颤后， 语音提示进行**2分钟心肺复苏**（流程符合**ERC与AHA 2010指南**）；
- 此后再次进行心律分析， 如有必要， 再次进行除颤；
- 上述流程将循环至专业急救人员抵达现场。



感谢您的关注